

Steridoo®

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion



Steridoo® Desinfektionstücher sind gebrauchsfertige, alkoholfreie Tücher für die Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen in denen ein hygienisch einwandfreier Zustand notwendig ist. Die Desinfektionstücher sind in verschiedenen Verpackungseinheiten und Spendersystemen verfügbar und zeichnen sich u. a. durch folgende Vorteile aus:

- Praktische Desinfektionstücher mit vielfältigen Einsatzzwecken für die schnelle Desinfektion
- Unglaublich ergiebig: **1000** feuchte **Desinfektionstücher pro Rolle**
- Geprüfte Wirksamkeit mit breitem Wirkungsspektrum gegen **Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren** sowie **Rota-, Noro- und Polyoma-Viren**.
- Große Tuchgröße von **170 x 200 mm**.
- Intensive Reinigungswirkung und gute Materialverträglichkeit, **auch bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas**.
- Aldehydfrei, phenolfrei, **pH-neutral** und **nahezu rückstandsfreie Abtrocknung**

- ✓ **Vier-Felder-Test** nach EN 16615 und VAH
- ✓ **Levurozid (Candida albicans)**
nach EN 13624, EN 13697, EN 16615 VAH
- ✓ **Bakterizid (inkl. MRSA)**
nach EN 13727, EN 13697, EN 16615 VAH
- ✓ **“Begrenzt viruzid”** - behüllte Viren
wie z. B. HBV, HIV, HCV - nach RKI/DVV
- ✓ Wirksam gegen **Rota-Viren** nach RKI/DVV, **Noro-Viren** nach EN 14476 und **Polyoma-SV 40 Viren** nach RKI/DVV

Steridoo® Desinfektionstücher - Wirksamkeiten und Prüfmethoden

Bakterien und Pilze

Bakterien und Candida albicans (hohe Belastung)	nach EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650	1 Min.
Bakterien und Candida albicans (hohe Belastung)	nach EN 13697	2 Min.
Bakterien und Candida albicans - Vier Felder Test nach EN 16615	nach EN 16615 und VAH	1 Min.

Viren

Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) (hohe Belastung)	gemäß RKI/DVV	1 Min.
Rota-Viren (niedrige Belastung)	nach EN 14476	1 Min.
Noro-Viren (niedrige Belastung)	nach EN 14476	30 Min.
Polyoma-SV 40 Viren (mit Belastung)	nach RKI/DVV	30 Min.

Steridoo®

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion



Lagerung

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Wirkstoffe der Tränklösung

100 g enthalten:

0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid

0,24 g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid

0,24 g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

Chemisch-physikalische Daten

Dichte: 1 g/cm³




pH-Wert bei 20°C: 7,2

Gebrauchshinweis

Desinfektionstücher vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett- und Produktinformation lesen. Biozid-Reg.-Nr. N-99857.

Hinweise zur Anwendung

Den Beutel oben öffnen und in den dafür vorgesehenen Spender/Behälter stellen. Das Tuch aus der Mitte der Rolle durch die Spenderöffnung ziehen. Spender/Behälter dicht verschließen. Öffnungsdatum, Haltbarkeitsdatum, sowie die gesetzrelevanten Hinweise der Tränkflüssigkeit beachten und auf ein Etikett zur äußeren Kennzeichnung des Behälters übertragen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und einwirken lassen. Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen Materialien wie Kunstleder erst an einer kleinen verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten (Wasser) Einmaltuch nachgewischt werden. Nach dem Öffnen des Beutels für 28 Tage verwendbar. Die Aufbereitung des Entnahmebehälter ist gemäß der nebenstehenden Aufbereitungshinweise mit einem geeigneten Desinfektionspräparat durchzuführen. Bei der Anwendung sind geeignete Handschuhe (z. B. aus Nitrilkauschuk) zu tragen.

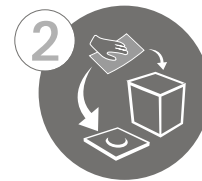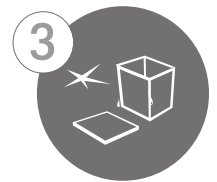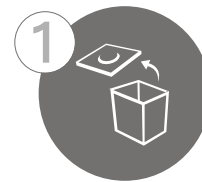

Verpackungs- und Bestellinformationen:

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	VPE
222351	Steridoo® Desinfektionstücher 1000 Blatt	2 x 1000 Tücher
222352	Steridoo® Desinfektionstücher 1000 Blatt, Maxipack	10 x 1000 Tücher
222353	Steridoo® Desinfektionstücher 1000 Blatt Kombipack, 3 Spendereimer mit 6000 Tüchern	3 Eimer & 6000 Tücher
112114	Spendereimer für Desinfektionstücher (Leereimer)	1 Stück

Bitte fragen Sie uns nach weiteren Zubehörartikeln.

